

既存の担架に取り付け組み立てるだけの

RESCUE PLUS

ストレッチャープラス



工具不要、コンパクト収納、かんたん組み立て。

イザという時に、担架がキャリーに早変わり。必要な時にだけ組み立てるため、収納時にもかさばらない。災害時の人手の足りない時にも、独りで楽に搬送可能に。

組み立て手順



組み立てた担架を裏返し、キャリー骨組み(小)を担架フレームにはめこみます。



左右からキャリー軸を花ねじで固定します。



キャリー骨組みの位置は、この部分が安全ベルトいっぱいまで担架脚部から遠ざけることで運搬時の加重を軽減できます。

安全ベルトで担架脚部にしっかりと固定します。




車輪をセットします。車輪止めピンはしっかりと押し込んでください。また取り外しの際には手を挟んだりしないようご注意ください。



キャリー骨組み(大)を同様に担架フレームにはめこみ、花ねじ・安全ベルトで固定し完成です。

※担架は別売りです

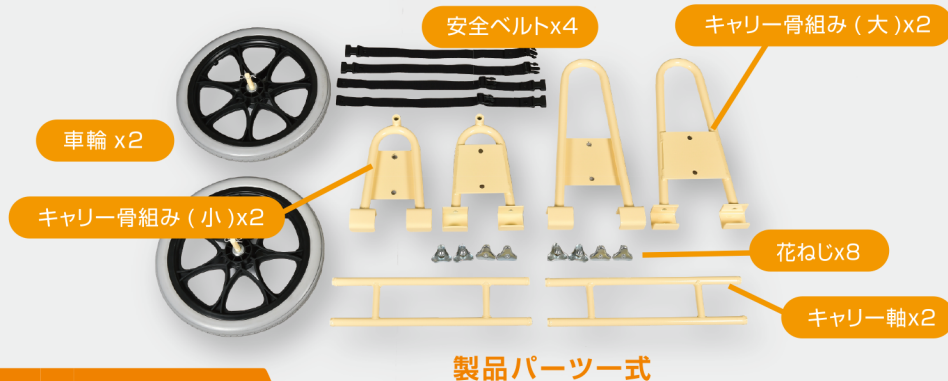

製品パーツ式

ストレッチャープラス

製品仕様

重量	パーツ自重合計 約 125kg
対応担架	担架幅 約 540mm
許容荷重	約 100kg
骨組材質	スチール製 粉黛焼付塗装
車輪	ノーパンク 16 1/2 PU タイヤ
外箱寸法	H270 x D400 x W500mm

製造元

株式会社ミヤジマ工業

総販売元

株式会社レスキュープラス

お問い合わせは



FCR株式会社

〒145-0071 東京都大田区田園調布3丁目41番2号
TEL 03-5483-0010 FAX 03-5483-0888 JRTEL 030-3030
www.fcr-corporation.co.jp info@fcr-corporation.co.jp